



Zoomed VetPad

Ветеринарное устройство
для обогрева пациента



Руководство пользователя
V 1.2

Оглавление

| | |
|---|---|
| 1. Описание прибора | 2 |
| 2. Встроенные меры безопасности | 3 |
| 3. Меры предосторожности при использовании..... | 3 |
| 3.1 Перед использованием | 3 |
| 3.2 Во время использования | 4 |
| 3.3 После использования..... | 4 |
| 4. Подключение и закачка воды..... | 5 |
| 5. Основные функции..... | 6 |
| 6. Специальные функции | 6 |
| 6.1 Таймер | 6 |
| 6.2 Блокировка от детей..... | 6 |
| 7. Поиск и устранение неисправностей..... | 7 |
| 8. Гарантия | 7 |


ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Описание прибора

Кнопка питания
Включение/выключение
термоблока

Кнопка сна
данный режим деак-
тивирован для новой
версии устройства

Декоративная
подсветка

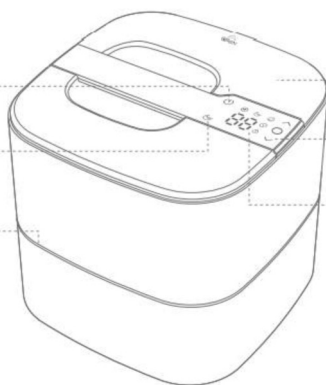


Верхняя крышка
порт для вливания воды

Клавиши настройки

Дисплей термоблока



Дисплей
термоблока

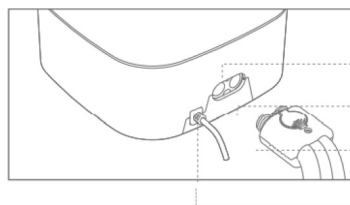

Порт для шланга

Уплотнительное кольцо

Заглушка для шланга

Силовой кабель

Описание значков дисплея

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Режим сна деактивирован для новой версии устройства | | Кнопка питания |
| | Режим защиты от клещей деактивирован для новой версии устройства | | Кнопка повышения температуры |
| | Блокировка от детей | | Кнопка понижения температуры |
| | Таймер | | Индикатор нехватки воды |



Пульт
управления

2. Встроенные меры безопасности

1. Разделение воды и электричества: нагрев происходит вне нагревательной магистрали, поэтому нет риска поражения электрическим током.
2. Автоматическое отключение питания: термоблок автоматически отключается при подъеме с поверхности. Нет риска утечки электроэнергии.
3. Защита от замерзания: когда температура в резервуаре для воды основного блока ниже 5°C, он автоматически открывается.



4. Нет электромагнитного излучения



5. Защита от перегрева: максимальная температура нагрева – 48°C



6. Защита от нехватки воды



7. Блокировка от детей



8. Таймер выключения



9. Автоматическое отключение через 24 часа

3. Меры предосторожности при использовании

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РАЗДЕЛОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ!

3.1 Перед использованием

1. Термоблок необходимо подключать к только матрасам, идущим в комплекте с прибором.
2. Убедитесь, что термоблок стоит устойчиво на поверхности, иначе прибор может работать некорректно.
3. Проверьте, что термоблок и матрас располагаются на одной высоте. Не рекомендуется устанавливать термоблок на высоте ниже нагревательного матраса.
4. Убедитесь, что заглушка шланга правильно подсоединена к разъему шланга термоблока (см. раздел 4).
5. Перед первым наполнением водой убедитесь, что соединение между термоблоком и матрасом нормальное, а матрас расположен ровно на поверхности, нет замятий матраса и нагревательной магистрали.
6. При заливке воды уровень воды не должен быть выше заливного отверстия. Используйте только дистиллированную воду комнатной температуры.

3.2 Во время использования

1. Обязательно накрывайте матрас пеленкой или одеялом. Не рекомендуется класть пациента на матрас без использования специальной прослойки.
2. **ВНИМАНИЕ!** Так как пеленка или матрас, которыми накрывают мат, забирают около 5-6°C тепла, то реальная температура нагрева мата всегда будет на 5-6°C больше той, которую пользователь выставляет на термоблоке.
3. Если в Вашей версии прибора активны режимы «Сушка» и «Защита от клещей», ни в коем случае не используйте их в то время, как на матрасе находится пациент. При данных режимах матрас резко нагревается до 65°C, что может привести к сильным ожогам и некрозу тканей.
4. Во время работы запрещается разделять термоблок и матрас во избежание ожогов.
5. Когда на мониторе термоблока отображается сообщение о нехватке воды, добавьте воды в порт для вливания. Если вы добавите слишком много воды, она может вытекать из вентиляционного отверстия во время нагрева. В этом случае выключите термоблок и слейте около 50 мл воды, чтобы вернуться к нормальному уровню.
6. Если термоблок наклонен, то из вентиляционного отверстия на крышке бака для воды из термоблока может вытекать вода.
7. Избегайте скручивания и деформирования соединительного шланга матраса, чтобы не повлиять на циркуляцию воды и нагревательный эффект.
8. При использовании острых предметов, таких как иглы или гвозди, рядом с матрасом, будьте аккуратны, чтобы избежать прокола матраса или силиконовой трубы магистрали и нарушению циркуляции воды; также избегайте попадания острых предметов в резервуар для воды.
9. Если термоблок и детали повреждены, верните его на завод для ремонта или обратитесь к официальному дистрибьютору устройства для диагностики и ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.
10. Применение данного устройства для пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями должно происходить только с разрешения врача.


3.3 После использования

1. Если вы не используете прибор в течение длительного времени, слейте воду из термоблока и матраса.
2. Если вы не использовали термоблок длительное время, для очистки накипи перед использованием: добавьте воды и включите его, дайте воде циркулировать в матрасе в течение нескольких минут, выключите питание и откройте крышку резервуара для воды, вылейте воду и снова наполните резервуар для воды. Повторите операцию 2-3 раза, чтобы очистить термоблок перед использованием.

4. Подключение и закачка воды



Поставьте термоблок на устойчивое место

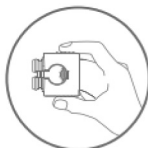

Сожмите стороны заглушки шланга




Вставьте заглушку шланга до щелчка



Закройте крышку бака для воды после наполнения



Подключите к розетке и коснитесь, чтобы включить



1. Подключите матрас к термоблоку, как показано на рисунках выше. Когда шланг вставлен в порт подключения термоблока, раздастся щелчок, указывающий на успешное соединение. Проверьте, чтобы не было утечек воды.
2. Поместите термоблок на ровную сторону кровати или устойчивую тумбочку возле кровати разложите матрас на кровати (конец шланга нужно располагать достаточно близко к термоблоку). Проверьте, что термоблок и матрас располагаются на одной высоте.
3. Заполните резервуар термоблока чистой водой и закройте крышку.
4. После включения термоблок издает звуковой сигнал, а дисплей и индикатор включения должны загореться и погаснуть один раз, указывая на то, что термоблок включен. После этого нужно нажать кнопку включения на термоблоке или пульте и выставить нужную температуру нагрева.
5. Когда воды станет недостаточно, индикатор нехватки воды «» начнёт мигать. Термоблок издаст непрерывный звуковой сигнал. После наполнения водой, значок нехватки воды перестает мигать, звуковой сигнал прекращается. Общее потребление воды при первом включении составляет около 1 литра.

ВНИМАНИЕ!





- Рекомендуется использовать дистиллированную воду.
- Запрещается добавлять кипяченую водопроводную воду, морскую воду или другие жидкости, а также посторонние предметы в термоблок.
- Реальная температура нагрева матраса на 5-6°C выше выставленной на термоблоке. Это связано с тем, что разницу в температуре поглощает пеленка или одеяло, которые необходимо положить на мат перед тем, как поместить на него пациента.

5. Основные функции

| | |
|---|---|
| Выключатель питания | Включение и выключение термоблока с пульта или панели термоблока |
| Режим умного сна | <i>данная функция была деактивирована для новой версии устройства</i> |
| Пользовательские настройки температуры | Включите и нажмите «  » или «  » на пульте или панели термоблока, чтобы отрегулировать температуру. Максимальная доступная для установки температура – 40°C (реальная температура мата без пеленки или одеяла при этом 45-46°C) |
| Защита от клещей/сушка | <i>данная функция была деактивирована для новой версии устройства</i> |
| Интеллектуальная память | При повторном включении термоблока он автоматически вернет значение температуры, которое было установлено до отключения питания. |
| Таймер | Возможность установки таймера (см. 6.1) |
| Блокировка от детей | Блокировка устройства и пульта (см. 6.2) |



6. Специальные функции

6.1 Таймер

Нажмите кнопку таймера на пульте дистанционного управления, войдите в настройки таймера и нажмите «» или «» установите нужное время.

1. Мигание прекращается через 5 секунд. Начинается обратный отсчёт времени.
2. Прибор настроен на заводе, термоблок не имеет настроек времени.

6.2 Блокировка от детей

Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку блокировки от детей «». Функция блокировки включена. В это время термоблок и пульт дистанционного управления блокируются, чтобы предотвратить неправильное использование детьми. Снова нажмите кнопку «», чтобы выключить функцию блокировки от детей. Обычно сразу после этого термоблок будет разблокирован.



Экран монитора



Экран монитора

7. Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Причина | Метод исправления |
|---|---|--|
| Прибор не включается | Нет электропитания | Проверьте, правильно ли подключен шнур питания и есть ли электрический ток в розетке, к которой он подключен. |
| | Сбой загрузки | Отключите шнур питания, подождите 5 секунд, снова подключите питание и включите прибор. |
| | Повреждение продукта | Немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к официальному дилеру. |
| Плохой нагрев | Засорение нагревательной магистрали | Распрямите соединительную трубку, осмотрите на наличие заломов и проверьте, нет ли засоров |
| | Нехватка воды в водяном баке термоблока | Добавьте очищенную воду согласно инструкции (см. раздел 4) |
| | Неправильная установка температуры | Увеличьте температуру. Обратите внимание, что в целях безопасности максимальная доступная на термоблоке - 40°C (реальная температура мата без пеленки или одеяла при этом 45-46°C) |
| | Повреждение продукта | Немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к официальному дилеру. |
| Ошибка «L» (на экране прибора вместо температуры отображается знак «L») | Повреждение продукта | Немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к официальному дилеру. |

8. Гарантия

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента реализации.

Не покрываются гарантией следующие случаи:

- Несоблюдение инструкций и мер предосторожности, указанных в данном руководстве.
- Случайные катастрофы и другие факторы, такие как высокое напряжение, пожар, наводнение, землетрясение и т.д. вызывают поломку изделия.
- Использование не по назначению или намеренное повреждение товара.
- Механические повреждения термоблока или матов.
- Истечение гарантийного срока.

Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон в течение всего срока гарантии. Характеристики прибора и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Фактическая форма и цвет продукта могут немного отличаться от показанных в руководстве.

Для заметок

Контактная информация

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО «ЗООМЕД»

Контактный телефон: 8 (800) 500-30-85

Сайт: www.zoomed.ru